


# ضد عفونی کننده های سطوح و منسوجات بیمارستانی

**ASEPTINE®**

**PERCIDINE®**

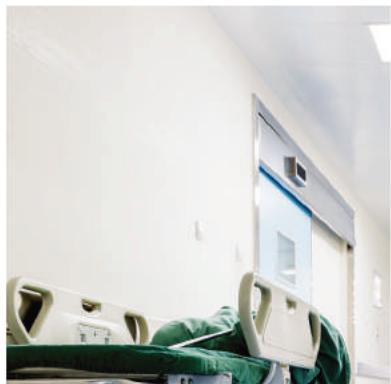

# ضد عفونی کننده های سطوح و منسوجات بیمارستانی

## ۱. سیدین پر

### ضد عفونی کننده کنسانتره و قوی سطوح مراکز درمانی

ترکیبات: پراستیک اسید، هیدروژن پراکساید، دیگر ترکیبات با اثر سینزیک

طیف اثر میکروبی: توانایی از بین بردن کلیه میکروارگانیسم ها

مزایای مصرف:

- موثر بر طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها به خصوص میکروب های مقاوم به دارو
- ترکیب پایدار شده پراستیک اسید و هیدروژن پراکساید
- فاقد هرگونه مواد آلدئیدی، فنلی، غیره؛ کاملاً ایمن برای انسان و محیط زیست
- قابلیت پاکسازی و انحلال انواع بیوفیلم ها و سایر رسوبات و بقایای بیولوژیک از سطوح مختلف



روش مصرف	زمان اثرباری	رقت مصرفی	کاربرد
با استفاده از اسفنج یا زمین شوی	۳۰ دقیقه	۰/۵ درصد	ضد عفونی کننده کنسانتره و قوی سطوح مراکز درمانی
	۲۰ دقیقه	۱ درصد	
	۱۵ دقیقه	۱/۵ درصد	
	۵ دقیقه	۲ درصد	

بسته بندی: ۱ و ۵ لیتری

## سایا سپت - اچ پی

### ضد عفونی کننده سطوح پزشکی، دندانپزشکی و بهداشتی

ترکیبات: دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید، الکیل دی متیل بنزیل آمونیوم کلراید، پلی هگزا متیلن بیگوانید هیدروکلراید (PHMB)

طیف اثر میکروبی: طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها مانند باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، ویروس های پوشش دار نظری HIV، HCV، HBV

مزایای مصرف:

- فاقد خورنده گی بر روی سطوح مورد استفاده در رقت مصرفی
- فاقد رنگ و بوی نامطبوع
- فرمولاسیون ویژه که مانع چسبندگی و ورقه شدن باقیمانده محلول بر روی سطوح می گردد.
- حاوی ۳ ماده آنتی میکروبیال مختلف به منظور ایجاد اثرات سینزیک
- موثر بر طیف وسیعی از میکروارگانیسم های عفونتزا
- موثر در غلظت های پایین و کاملاً مقرر به صرفه
- دارای قابلیت پاک کنندگی و ضد عفونی کنندگی همزمان
- فاقد آلدئید، فنل، کلر و سایر ترکیبات سمی؛ کاملاً ایمن برای کاربران

EN 1040

EN 13727



روش مصرف	زمان اثرباری	رقت مصرفی	کاربرد
با استفاده از اسفنج یا زمین شوی	۳۰ دقیقه	۰/۵ درصد	ضد عفونی کننده سطوح پزشکی، دندانپزشکی و بهداشتی
	۱۰ دقیقه	۱ درصد	
	۵ دقیقه	۲ درصد	

بسته بندی: ۱ و ۵ لیتری

# Healthcare Surfaces and Textiles Disinfectants

EN 1040

EN 14348



## سپتی سرفیس

### ضد عفونی کننده سریع و تمیز کننده سطوح و تجهیزات

ترکیبات: اتانول، پلی هگزا متیلن بی گوانید هیدرو کلرايد (PHMB)، دی دسیل دی متیل آمونیوم کلرايد طیف اثر میکروبی: طیف وسیعی از میکرووار گانیسم‌ها مانند باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، مایکو باکتریوم‌ها، ویروس‌ها و قارچ‌ها  
مزایای مصرف:

- دارای خاصیت سریع و مؤثر به واسطه وجود اتانول (اثربخشی در ۱ تا ۲ دقیقه)
- دارای اثرات پایدار به واسطه وجود PHMB و دی دسیل دی متیل آمونیوم کلرايد
- دارای اثرات وسیع الطیف به واسطه وجود ۳ نوع ماده آنتی میکروبیال مختلف در ترکیب محلول
- فاقد هر گونه مواد سمی و کاملاً سازگار با سطوح مختلف درمانی و بیمارستانی

بسته‌بندی: ۱۲۵ و ۵۰۰ سی سی - ۵ لیتری

## پرسیدین٪۱

### ویژه ضد عفونی منسوجات

ترکیبات: پرستیک اسید، هیدروژن پراکساید

طیف اثر میکروبی: موثر بر طیف وسیعی از ویروس‌ها، باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت، قارچ‌ها و اسپور باکتریایی  
مزایای مصرف:

- موثر بر طیف وسیعی از میکرووار گانیسم‌های پاتوزن
- قابلیت ضد عفونی البسه، پارچه و غیره در ماشین‌های لباسشویی صنعتی و سیستم لاندری بیمارستان‌ها
- کاملاً اقتصادی و مقرر به صرفه
- قابلیت استفاده جهت انواع پارچه، (حتی پارچه‌های رنگی)
- جایگزین مناسب هیپو کلریت سدیم (آب‌زوال) به دلیل عدم تخریب الیاف پارچه در طولانی مدت
- دوستدار محیط زیست و فاقد باقیمانده سمی
- فاقد رنگ و بوی نامطبوع برای کاربر در هنگام مصرف

بسته‌بندی: ۱ و ۵ لیتری



## پرسیدین آکوا

### ضد عفونی کننده انواع سطوح و تجهیزات پزشکی

(قابل استفاده برای دستگاه‌های ضد عفونی کننده هوا و سطوح)

ترکیبات: هیدروژن پراکساید (٪ ۴۶) و یون‌های نقره (٪ ۰/۰۴۴)

طیف اثر میکروبی: موثر بر طیف وسیعی از میکرووار گانیسم‌های مولد عفونت‌های بیمارستانی شامل باکتری، ویروس، قارچ و مایکو باکتریوم‌ها  
مزایای مصرف:

- دارای اثر پایدار به واسطه وجود ترکیبات نقره
- موثر بر بیوفیلم‌ها با قابلیت استفاده در شرایط بحرانی (اپیدمی‌ها)
- قابلیت کاربری وسیع در اتاق‌های عمل، بخش‌های ویژه و اتاق‌های ایزوله
- کاملاً غیر سمی و فاقد اثرات مخرب و آسیب‌رسان برای کاربر و همچنین تجهیزات بیمارستانی

بسته‌بندی: ۱ و ۵ لیتری



Behban Shimi  
Pharmaceutical Company





**Behban Shimi**  
- Pharmaceutical Company -



**BEHBAN PHARMED LOTUS**  
Business Investment & Manufacturing Company



## Healthcare Surfaces and Textiles Disinfectants

نشانی دفتر مرکزی: خیابان آزادی، روبروی دانشکده دامپزشکی، ساختمان کاوه،  
بلوک B، طبقه ۱۲، واحد ۱۱۳، کد پستی: ۱۳۱۲۶۵۵۴۷۱  
تلفن: ۰۶۰۸۱۲۶۳، ۰۶۰۸۱۲۶۷۹، ۰۶۰۸۱۲۹۴ - ۰۵، فکس: ۰۶۰۸۱۲۵۴  
نشانی کارخانه: استان گلستان، گرگان، شهرک صنعتی آق قلا، فاز ۳، خیابان صنعت ۴  
تلفکس: ۰۱۷ (۳۴۵۳۳۵۶۶-۹)، شماره داخلی فکس: ۱۴



ISO 9001:2015  
ISO 13485:2016



[www.behban.com](http://www.behban.com)

[info@behban.com](mailto:info@behban.com)